

HEMOSIDERINA

Actualizado en agosto 2024 por TM Juan Fco. Galleguillos
Revisado y Aprobado por Dr. Mauricio Ocqueteau.

Código del Examen : 426

Nombres del Examen : Hemosiderina

Laboratorios de Procesamiento	Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
	Laboratorio Hematología de Especialidad	Lunes a Viernes muestra tomada. Lunes a Jueves si la muestra debe ser tomada en CECA	5 días hábiles

Preparación del Paciente : Según indicación médica. La recolección de la muestra debe ser realizada por un médico.

Muestra Requerida : Extendido de médula ósea
Muestra Opcional: No Aplica

Estabilidad de la Muestra ¹	Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada* (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
	Extendido de médula ósea	1 mes	No aplica	No Aplica

Condiciones de Envío al Laboratorio¹ : Dentro de Santiago y en el día
Extendido de Médula Ósea: Ambiente SI/Refrigerada NO/Congelada NO

*Desde fuera de Santiago
Extendido de Médula Ósea: Ambiente SI/Refrigerada NO/Congelada NO

Nota : Los exámenes de Hemosiderina medular derivados de centros médicos externos a la Red, deberán venir acompañados de la orden médica con diagnóstico.

Método Utilizado² : Tinción de Perls.

Intervalos de Referencia¹ : 15-30% de Sideroblastos

Valor Crítico : No Aplica

Información Clínica¹⁻² : La cuantificación porcentual de sideroblastos en médula ósea es útil para el diagnóstico diferencial de anemias.

Referencias :
1. Acta Med. Scand. 165;333,1959
2. Manual de Técnicas de Laboratorio en hematología, 2ª Edición, Joan Lluís Vives, 72; 337; 316.