

Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

Histoplasma capsulatum, detección por PCR en tejidos y LBA

. Actualizado en Septiembre 2022 por BO Carolina Miranda Revisado y Aprobado por Dra. Patricia García

Código del Examen : 2929

Nombres del Examen : Histoplasma capsulatum, detección por PCR en tejidos y LBA.

Laboratorios de Procesamiento

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Microbiología	Lunes a Viernes	5 días hábiles

Preparación del Paciente No requiere preparación

Estabilidad de la Muestra

	Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (4°C)	Congelada (-20°C)
6	LBA	4 horas	72 horas	1 mes
	Tejidos	4 horas	72 horas	1 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio

: *Dentro de Santiago y en el día

Tejidos o LBA: Ambiente Sí/ Refrigerada Sí/ Congelada Sí

*Desde fuera de Santiago

Tejidos o LBA: Ambiente Sí/ Refrigerada Sí / Congelada Sí

Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

Método Utilizado

- Análisis dirigido a una región del genoma de Histoplasma capsulatum, para la proteína de 100kDa (Hcp100)
 - Extracción del ADN fúngico.
 - PCR en tiempo real para detección de Histoplasma capsulatum.

Intervalos de Referencia No aplica.

Valor Crítico No aplica.

Parámetros de Desempeño¹ El límite de detección corresponde a 63 genomas por reacción.

Información Clínica 1,3,4

: Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico que tiene una fase micelial saprobia geofílica (forma infectiva) que se asocia con guano de murciélagos y aves, mientras que la fase de levadura (forma virulenta-parasitaria) es frecuentemente encontrada dentro de fagocitos de mamíferos. Este hongo es el agente etiológico de la histoplasmosis, micosis sistémica más común del aparato respiratorio que afecta a humanos y otros mamíferos. La enfermedad es endémica en varias regiones de América.

Resultados posibles:

- Resultado Positivo: Presencia de DNA de Histoplasma capsulatum.
- Resultado Negativo: Ausencia de DNA de Histoplasma capsulatum.

Factores Interferentes: Inhibidores de la PCR



Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

Referencias

- : 1. López LF, Muñoz CO, Cáceres DH, Tobón ÁM, Loparev V, Clay O, Chiller T, Litvintseva A, Gade L, González Á, Gómez BL. Standardization and validation of real time PCR assays for the diagnosis of histoplasmosis using three molecular targets in an animal model. PLoS One. 2017 Dec 29; 12(12):e0190311.
 - 2. González-González AE, Aspectos relevantes del marcador molecular Hcp100 de Histoplasma capsulatum y su potencial uso terapéutico en la histoplasmosis. Rev Iberoam Micol. 2012 Jul-Sep; 29(3):115-9.

