

## TEST PACK EMBARAZO

Actualizado en noviembre 2022 por TM. Ricardo de la Barra D.  
Revisado y Aprobado por TM. María Patricia Vega U.

**Código del Examen** : 736

**Nombres del Examen** : Embarazo, Test rápido

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio Hospital Clínico	Lunes a Domingo 24 horas	1 hora
Laboratorio Clínico San Carlos de Apoquindo	Lunes a Domingo 24 horas	1 hora

**Preparación del Paciente** : No requiere preparación.

**Muestra Requerida** : **Orina aislada.**  
De preferencia usar la primera orina de la mañana, ya que ésta posee mayor concentración de hCG. Debe enviarse al laboratorio en un frasco limpio y seco.

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Orina aislada	2 horas	5 días	60 días

**Condiciones de Envío al Laboratorio** : \*Dentro de Santiago y en el día: Enviar lo más pronto posible al laboratorio para su procesamiento.

Ambiente SI / Refrigerada SI/ Congelada SI

\*Desde fuera de Santiago  
Ambiente SI / Refrigerada SI/ Congelada SI

*\*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

**Método Utilizado** : Inmunoensayo Cromatográfico cualitativo.

**Intervalos de Referencia** : Negativo

**Valor Crítico** : No aplica

**Parámetros de Desempeño** : Sensibilidad:  $\geq 25$  mUI/mL en orina.

**Información Clínica** : Diagnóstico de embarazo.

**Referencias** : Sinfex en línea  
Inserto: Prueba rápida de embarazo hCG en cassette. ONSite Biotech,