

GLUCOSA POST CUALQUIER INDICACIÓN

Actualizado en Diciembre 2024 por TM Jacqueline Parada
Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 1147

Nombres del Examen : Glucosa post cualquier indicación médica.

Laboratorios de Procesamiento :	Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
	Laboratorio CMSJ Bioquímica (Química)	Lunes a Sábado	1 día hábil
	Laboratorio Hospital Clínico	Lunes a Domingo 24 horas	1 hora después de recibida la totalidad de las muestras.
	Laboratorio Clínica San Carlos de Apoquindo	Lunes a Domingo 24 horas	Rutina: En el día Urgente (STAT): 1 hora después de recibida la totalidad de las muestras.

Preparación del Paciente : Según indicación médica.

Muestra Requerida : ■ Plasma - Fluoruro

Muestra Post Indicación Médica*:

Recolectar mínimo 2 mL de sangre en un tubo tapa gris (fluoruro de sodio).
Rotular el tiempo de recolección.

*El muestreo es realizado según indicación médica.

*La indicación médica puede ser postprandial o post ingesta oral de glucosa.

Dosis de Glucosa:

- Adultos y Niños con peso igual o superior a 43 kilos: administrar 75 grs. de glucosa.
- Adultos y Niños con peso inferior a 43 kilos: administrar 1.75 grs. de glucosa / kilogramo de peso (Máximo 75 grs.).

La solución de glucosa debe beberse en 5 minutos.

*Previo a la administración de glucosa realizar un hemoglucotest. Si en adultos el resultado es > 160 mg/dL, o en niños > 130 mg/dL, **NO** se debe continuar con el examen. Avisar al médico tratante.*

Muestra Opcional: No Aplica.

Estabilidad de la Muestra ^{2,3} :	Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
	Sangre Total con Fluoruro	3 días	Sin información	No aplica
	Plasma - Fluoruro	3 días	3 días	1 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día
Sangre Total con Fluoruro: Ambiente SI/ Refrigerada NO/ Congelada NO
Plasma - Fluoruro: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago

Plasma - Fluoruro: Ambiente SI / Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado ³ : Enzimático / Cobas / Roche

Intervalo de Referencia ¹ : No aplica.

Valor Crítico ⁴	:	Bajo		Alto	
		Glucosa Basal	≤ 40 mg/dL	RN* > 250 mg/dL	
				Niños y Adultos > 500 mg/dL	

**Se considera RN hasta 28 días.*

Parámetros de Desempeño ^{3,5} : Coeficiente de Variación Analítico interensayo:
1.69 % para concentraciones de 85.4 mg/dL
1.67 % para concentraciones de 278.7 mg/dL

Límite de detección:
2 mg/dL

Intervalo de medición:
2 - 750 mg/dL

Información Clínica ^{1,6} : Coeficiente de Variación Biológico Intra individuo: 5.7 %
Coeficiente de Variación Biológico Inter individuo: 6.9 %

Tanto el ADA (American Diabetes Association) como la WHO (World Health Organization) recomiendan la medición de la glucosa en ayunas y la medición de la tolerancia a la glucosa 2 horas post carga de 75 grs. de glucosa, como los test de elección para el diagnóstico de diabetes y para las categorías de riesgo a desarrollar diabetes (glicemia en ayuno alterada e intolerancia a la glucosa oral).

La evaluación de la glicemia a otros tiempos de muestreo queda a criterio e interpretación médica.

- Referencias** :
1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, volume 36, supplement 1, January 2013.
 2. Chan A., Swaminathan R., and Cockram C. (1989). Effectiveness of Sodium Fluoride as a Preservative of Glucose in Blood. Clin. Chem. 35/2, 315 - 317.
 3. Cobas. GLUC3. Glucose HK Gen.3. Inserto del Fabricante.
 4. Servicio de Laboratorios Clínicos Pontificia Universidad Católica de Chile. Procedimiento Valores de Alerta. Documento Interno.
 5. Software para el manejo del Control de Calidad Interno. Modulab Gold.
 6. Westgard J. Biologic Variation Database. Disponible en: <http://www.westgard.com/biodatabase1.htm>