

TRIGLICERIDOS EN OTROS FLUIDOS

Actualizado en Enero 2025 por TM Jacqueline Parada.
Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 1661

Nombres del Examen : Triglicéridos en otros fluidos

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Bioquímica (Química)	Lunes a Sábado	1 día hábil (para pacientes ambulatorios)
Laboratorio Hospital Clínico	Lunes a Domingo 24 horas	1 hora (sólo para pacientes Hospitalizados)
Laboratorio Clínica San Carlos de Apoquindo	Lunes a Domingo 24 horas	Rutina: En el día Urgente (STAT): 1 hora. (sólo para pacientes Hospitalizados)

Preparación del Paciente : Según tipo de muestra e indicación médica.

Muestra Requerida : ■ Fluido biológico
Recolectar mínimo 2 mL de fluido biológico en un tubo tapa roja (sin anticoagulante). Mantener y enviar refrigerado al laboratorio.

Muestra Opcional: No Aplica.

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Fluido biológico	1 día	7 días	1 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día
Fluido biológico: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago
Fluido biológico: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado ¹ : Enzimático- Colorimétrico/ Roche/ Cobas

NOTA: Con esta metodología se pueden obtener resultados falsamente bajos cuando los pacientes se encuentran en tratamiento con Acetaminofeno (paracetamol), NAPQI (N-acetil-p-benzoquinona imina, NAC (N-acetilcisteína), Metamizol (Novaminsulfona, Dipirona), 4-AAP (4-Aminoantipirina) y/o 4-MAP (4-Metilamino-antipirina). Se recomienda tomar las muestras antes de la administración de Metamizol. (Aviso FSN-RPD-2014-008 Roche)

Intervalo de Referencia : No disponible.

Valor Crítico : No aplica.

Parámetros de Desempeño ¹ : Límite de detección:
8.85 mg/dL

Rango Analítico:
8.85 - 885 mg/dL

Información Clínica ² : La determinación de triglicéridos en fluidos corporales es útil para distinguir entre efusiones quillosas y no quillosas. La presencia de efusiones quillosas, que resultan del drenaje linfático en una cavidad corporal puede ser determinada por la identificación de triglicéridos y quilomicrones en el fluido.

Referencias :

1. Cobas. TRIGB, Triglycerides. Inserto del Fabricante
2. Mayo Medical Laboratories. TGLBF, Triglycerides, body fluid. Mayo Clinic.

