Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

PANEL MIOPATÍAS INFLAMATORIAS

Actualizado en agosto 2025 por TM Jacqueline Parada. Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 2720

Nombres del Examen : Panel Miopatías Inflamatorias, Panel Miositis

Permite la detección de autoanticuerpos del tipo IgG para los siguientes 18 antígenos: Mi-2 α , Mi-2B, TIF1 γ , MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-

1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A y HMGCR.

Laboratorios de Procesamiento

Laboratorio Días de Procesamiento Plazo de Entrega de Resultados

Laboratorio CMSJ
Bioquímica Según demanda 10 días hábiles
(Autoinmunidad-Varios)

Preparación del Paciente : No requiere

Muestra Requerida ¹ : ■ Suero

Recolectar mínimo 3 mL de sangre en un tubo tapa roja (sin anticoagulante).

Muestra Opcional: No aplica.

Estabilidad de la Muestra 1,2

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8°C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	8 horas	Sin información	No aplica
Suero	3 días	14 días	28 días

Condiciones de Envío al Laboratorio¹ : *

*Dentro de Santiago y en el día

Sangre Total: Ambiente SI/ Refrigerada NO/ Congelada NO Suero: Ambiente SI / Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago

Suero: Ambiente SI / Refrigerada SI/ Congelada SI

*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

Método Utilizado ¹ : Inmunoblot

Intervalo de Referencia ¹

Anticuerpo	Resultado
lgG anti Mi-2α	Negativo
IgG anti Mi-2B	Negativo
lgG anti TIF1γ	Negativo
IgG anti MDA5	Negativo
IgG anti NXP2	Negativo
IgG anti SAE1	Negativo
IgG anti Ku	Negativo
IgG anti PM-Scl100	Negativo
IgG anti PM-Scl75	Negativo
IgG anti Jo-1	Negativo



Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

Anticuerpo	Resultado
IgG anti SRP	Negativo
IgG anti PL-7	Negativo
IgG anti PL-12	Negativo
IgG anti EJ	Negativo
IgG anti OJ	Negativo
IgG anti Ro-52	Negativo
IgG anti cN-1A	Negativo
IgG anti HMGCR	Negativo

La interpretación de los resultados se realiza según la siguiente tabla:

Interpretación	Intensidad
Negativo	0 - 14
Positivo débil	15 - 35
Positivo moderado	36 - 70
Positivo fuerte	71 - 255

Valor Crítico

Parámetros de Desempeño 1

No aplica

Anticuerpo	Especificidad clínica	
Anti Mi-2α	100%	
Anti Mi-2B	98-100%	
Anti MDA5	100%	
Anti NXP2	100%	
Anti SAE1	100%	
Anti Ku	95-97%	
Anti PM-Scl100	100%	
Anti PM-Scl75	98%	
Anti Jo-1	100%	
Anti SRP	99%	
Anti PL-7	100%	
IgG anti PL-12	100%	
lgG anti EJ	100%	
IgG anti OJ	100%	
IgG anti HMGCR	96%	

Información Clínica

Este panel ha sido diseñado para ayudar al diagnóstico de miopatías inflamatorias. Incluye la detección de 16 anticuerpos de tipo IgG, relevantes desde el punto de vista epidemiológico-clínico: IgG anti Mi-2 α , IgG anti Mi-2 β , IgG anti TIF1 γ , IgG anti-MDA5, IgG anti-NXP2, IgG Anti-SAE1, IgG anti-Ku, IgG anti PM-Scl100, IgG anti PM-Scl75, IgG anti Jo-1, IgG anti-SRP, IgG anti PL-7, IgG anti PL-12, IgG anti-EJ, IgG anti-OJ, IgG anti Ro-52. Las miopatías inflamatorias constituyen un grupo heterogéneo de patologías músculo-esqueléticas poco frecuentes (incidencia aproximada de 1:100.000 personas por año), que afectan tanto a adultos como a niños. La etiología es desconocida, pero se ha demostrado un componente autoinmune, potencialmente tratable. La detección de anticuerpos específicos en esta patología ayuda a la confirmación diagnóstica, a la delimitación del cuadro clínico específico y puede tener implicancias pronosticas.

Indicaciones:

- Estudio de miopatías inflamatorias



Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

Referencias

- EUROLINE Autoimmune Inflammatory Myopathies 16 Ag (IgG), Euroimmun. Inserto del fabricante. Dalakas. Inflammatory Muscle Diseases. The New England Journal of Medicine, 2015.

