

CITOLOGICO DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO

Actualizado en Marzo 2021 por TM Juan Fco. Galleguillos
Revisado y Aprobado por Dr. Pablo Bertin C

Código del Examen : 513

Nombres del Examen : Citológico de líquido Cefaloraquideo

Laboratorios de Procesamiento

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Hematología (Hematología de Especialidad)	Lunes a Viernes (08:00 - 16:00 hrs.)	Rutina: 5 días Urgente (STAT): al día siguiente.

Nota:

Las muestras se reciben de Lunes a Jueves hasta las 16:00 hrs y los días Viernes y víspera de festivos hasta las 14:00 hrs.

Preparación del Paciente : Según indicación médica. La recolección de la muestra debe ser realizada por un médico.

Muestra Requerida : ■ Líquido cefaloraquideo obtenido por punción lumbar
Adulto: Recolectar líquido (aprox. 20 gotas) en un tubo tapa lila (EDTA).
Pediátrico: Recolectar líquido (aprox. 20 gotas) en un tubo tapa lila (EDTA).

Muestra Opcional: No Aplica

Estabilidad de la Muestra¹

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada* (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Líquido Cefaloraquideo	4 horas	24 horas	No Aplica

Condiciones de Envío al Laboratorio

: Dentro de Santiago y en el día
Líquido a t° Ambiente SI/Refrigerada SI/Congelada NO

*Desde fuera de Santiago

Líquido a t°: Ambiente NO/Refrigerada SI/Congelada NO

**Sólo si la muestra proviene de fuera de Santiago y el tiempo de transporte lo requiere.*

Si el traslado de la muestra demorara más de 24 horas no sirve.

Método Utilizado : Tinción de células obtenidas por decantación .

Intervalos de Referencia : Normalmente se puede observar uno que otro linfocito, macrófago y/o Célula mesotelial.

Información Clínica : Este método se utiliza para descartar metástasis del Sistema Nervioso Central de Procesos malignos.

Referencias : Tood-Sanford, Clinical Diagnosis and Managent, 17 th Ed.