

PCR PARA VIRUS HERPES 6

Actualizado en Mayo 2022 por TM. Ana Maria Contreras.
Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferrès.

Código del Examen : 2261

Nombres del Examen : PCR PARA VIRUS HERPES 6 POR TIEMPO REAL

Laboratorios de Procesamiento	Laboratorio		Plazo Máximo de Entrega de Resultados
	Días de Procesamiento		
	Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs Sábado de 9:00 a 15:00 hrs	2 días hábiles

Preparación del Paciente : No requiere preparación.

Muestra Requerida : Líquido cefaloraquídeo (LCR) 0.5 ml en frasco o tubo estéril,
Sangre en tubo con EDTA (tubo tapa lila)
Biopsia, Tejido, Medula Ósea en tubo estéril.

Estabilidad de la Muestra	Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
	Sangre	4 Hrs	48 Hrs	Nunca
	Otras Muestras	NO	48 hrs	1 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día: Todas las muestras se envían a 4°C, con unidades refrigerantes

*Desde fuera de Santiago: plasma (separar desde tubo tapa lila) y los otros tipos de muestra, se envían con unidades refrigerantes o congeladas.

*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

Método Utilizado : Real Time PCR

Intervalos de Referencia : Negativo

Valor Crítico : Valor de alerta Positivo en LCR

Parámetros de Desempeño : 100 copias/mL a 100.000.000 copias/mL

Información Clínica : Diagnóstico diferencial de meningoencefalitis viral en inmunosuprimidos. Permite la identificación del genoma de virus herpes 6 en el líquido cefalorraquídeo del paciente (y de otros fluidos).

Referencias : LightMix® for the detection of HHV6. Cat#40-0282-32, Tib Mol Biol Roche