

CITOMEGALOVIRUS, IgG

Actualizado en Noviembre 2024 por TM. Mónica Concha.
Revisado y Aprobado por TM. Osvaldo Villarreal, Juan Carlos Román.

Código del Examen : 165

Nombres del Examen : Citomegalovirus, IgG.

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Microbiología (Parasitología)	Lunes a Viernes (08:00-16:00 hrs.)	1 día hábil después de las 17:00 hrs. (para pacientes Ambulatorios)
Laboratorio Hospital Clínico	Lunes a Domingo 24 horas	2 horas (sólo para pacientes Hospitalizados)

Preparación del Paciente : No requiere preparación

Muestra Requerida^{1,3} :

■ Suero:
Recolectar mínimo 2 mL de sangre en un tubo tapa roja (sin anticoagulante).
En caso de obtener un resultado indeterminado o dudoso, se sugiere repetir
el examen con una **nueva muestra en 15 días**.

Muestra opcional (Sólo Laboratorio Hospital Clínico UC):

■ Suero (tubo gel)

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre total	2-4 horas	No aplica.	No aplica.
Suero	8 horas	72 horas	1 año.

Condiciones de Envío al Laboratorio :

*Dentro de Santiago y en el día
Sangre Total: Ambiente SI / Refrigerada NO / Congelada NO
Suero : Ambiente SI / Refrigerada SI / Congelada SI

*Desde fuera de Santiago
Suero : Ambiente SI / Refrigerada SI / Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : Técnica ELFA (inmunoensayo enzimático fluorescente).

Intervalos de Referencia : Negativo.

Valor Crítico : No aplica.

Parámetros de Desempeño¹ :

Sensibilidad Clínica : 98%
Especificidad Clínica : 100%

Información Clínica^{1,2} :

El Citomegalovirus puede ser el causante de patologías graves tanto en el niño como en el adulto. Puede persistir durante años en el organismo de una persona infectada y causar infecciones recurrentes.

Es un virus muy frecuente un 60 a un 85% de la población está infectada. No obstante, la mayoría de los casos son asintomáticos.

