

## PERFIL COVID INFLAMATORIO

Actualizado en junio 2025 por TM Ricardo de la Barra.  
Revisado y Aprobado por Dra. Ana María Guzmán.

Código del Examen : 2815

Este examen está compuesto por:

Prestación	Código
Proteína C Reactiva	645
Interleukina 6	2809
Ferritina	347
Dímero D	250

Nombres del Examen : Perfil COVID Inflamatorio

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio Hospital clínico	Lunes a Domingo 24 horas	90 minutos

Preparación del Paciente <sup>1</sup> : Requiere ayuno mínimo de 8 horas antes de la recolección de la muestra.  
No existe restricción en la ingesta de agua.

Muestra Requerida :   
■ Suero (Tubo tapa amarilla)  
■ Plasma - Citrato trisódico 3,8% o 3.2% (Tubo celeste)

Recolectar mínimo 2 mL de sangre en un tubo tapa amarilla (con gel separador), y 2 mL de sangre en un tubo tapa celeste (citrato de sodio).

Estabilidad de la Muestra <sup>1,2,3,4</sup> :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	2 horas	Sin información	No aplica
Suero	5 horas	1 días	3 meses
Sangre Total con Citrato	4 horas	No aplica	No aplica
Plasma - Citrato	8 horas	72 horas	6 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio :

\*Dentro de Santiago y en el día  
 Sangre Total: Ambiente SI/ Refrigerada NO/ Congelada NO  
 Suero: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI  
  
 Sangre Total con Citrato: Ambiente SI/ Refrigerada NO/ Congelada NO  
 Plasma - Citrato: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI  
  
 \*Desde fuera de Santiago  
 Suero: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI  
 Plasma - Fluoruro: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI

\*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.



Sistema de Información de Exámenes, SINFEX

<b>Método Utilizado</b>	:	Referirse a cada examen en particular
<b>Intervalos de Referencia</b>	:	Referirse a cada examen en particular
<b>Valor Crítico</b>	:	No aplica
<b>Parámetros de Desempeño</b>	:	Referirse a cada examen en particular
<b>Información Clínica</b>	:	Útil para manejo de pacientes con compromiso grave por SARS CoV-2.
<b>Referencias</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema de Información de Exámenes, SINFEX. Proteína C Reactiva. Código 645. Servicios de Laboratorios Clínicos.</li><li>2. Sistema de Información de Exámenes, SINFEX. Interleukin-6. Código 2809. Servicios de Laboratorios Clínicos.</li><li>3. Sistema de Información de Exámenes, SINFEX. Ferritina. Código 347. Servicios de Laboratorios Clínicos.</li><li>4. Sistema de Información de Exámenes, SINFEX. Dímero D. Código 250. Servicios de Laboratorios Clínicos.</li></ol>

