

NITROGENO UREICO EN OTROS FLUIDOS

Actualizado en Enero 2025 por TM Jacqueline Parada.
Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 1530

Nombres del Examen : Nitrógeno ureico en otros fluidos

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Bioquímica (Química)	Lunes a Sábado	1 día hábil (para pacientes Ambulatorios)
Laboratorio Hospital Clínico	Lunes a Domingo 24 horas	1 hora (sólo para pacientes Hospitalizados)
Laboratorio Clínica San Carlos de Apoquindo	Lunes a Domingo 24 horas	Rutina: En el día Urgente (STAT): 1 hora. (sólo para pacientes Hospitalizados)

Preparación del Paciente : Según tipo de muestra e indicación médica.

Muestra Requerida : ■ Fluido biológico
Recolectar mínimo 2 mL de fluido biológico en un tubo tapa roja (sin anticoagulante). Mantener y enviar refrigerado al laboratorio.

Muestra Opcional: No Aplica.

Estabilidad de la Muestra ³ :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Fluido biológico	Sin información	7 días	4 semanas

Condiciones de Envío al Laboratorio :

*Dentro de Santiago y en el día
Fluido biológico: Ambiente NO/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago
Fluido biológico: Ambiente NO/ Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado ¹ : Test UV Cinético / Roche/ Cobas

Intervalo de Referencia : No disponible.

Valor Crítico : No aplica.

Parámetros de Desempeño ¹ : Límite de detección:
2.8 U/L

Rango de medición:
2.8 - 5.600 U/L

Información Clínica : La utilidad clínica de este examen depende del tipo de fluido biológico y de la condición clínica del paciente, por lo que debe ser interpretado por el médico tratante.

Referencias : 1. Cobas. UREAL, Urea/BUN. Inserto del Fabricante
2. Mayo Medical Laboratories. Blood Urea Nitrogen, body fluid. Mayo Clinic.